

BIGUANID FLÄCHE NR



PREVENT

OBERFLÄCHENDESINFEKTION UND -REINIGUNG NICHTINVASIVER
MEDIZINPRODUKTE MIT MECHANISCHER EINWIRKUNG

1 / 4

Gute Materialverträglichkeit
mit einer Vielzahl an Materialien

Grapefruitduft sorgt für
komfortable Anwendung



FLÄCHE / DESINFEKTIONSMITTELKONZENTRATE

**BIGUANID
FLÄCHE NR**



PREVENT

PRODUKTBESCHREIBUNG

2 / 4

BIGUANID FLÄCHE NR ist ein Konzentrat zur Oberflächendesinfektion und -reinigung nichtinvasiver Medizinprodukte mit mechanischer Einwirkung und ist gut geeignet zur Flächendesinfektion von abwaschbaren nicht porösen Flächen. Das universell einsetzbare Produkt wirkt auf der Basis von quartären

Ammoniumverbindungen. Durch die gute Materialverträglichkeit und den angenehmen Geruch ist es zu empfehlen für Bereiche, in denen neben komfortabler Anwendung und der Erfüllung hoher hygienischer Anforderungen eine Geruchsbelästigung vermieden werden soll.

ANWENDUNGEN UND HINWEISE

Anwendungsgebiete gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR)

Zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art, auch in allen Bereichen der Lebensmittelverarbeitung und Großküchen.

Anwendung

Nur zur professionellen Anwendung. Sichtbare Verschmutzungen sind vor der Desinfektion zu entfernen. Flächenwischdesinfektion: Die zu desinfizierende Fläche mit einer ausreichenden Menge der frisch angesetzten BIGUANID FLÄCHE NR Gebrauchslösung vollständig benetzen und diese mechanisch verteilen (Scheuer-Wisch-Desinfektion). In der Routineanwendung können die desinfizierten Flächen unmittelbar nach der Abtrocknung wieder genutzt werden. Lebensmittelkontaktflächen nach Ablauf der Einwirkzeit mit Wasser geeigneter Qualität nachspülen.

Konzentrat - nur verdünnt anwenden! Die Gebrauchslösung in der gewünschten Konzentration mit Wasser geeigneter Qualität (max. 40 °C) ansetzen. Medizinprodukte, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit dem Körper in Kontakt kommen, nach Ablauf der Einwirkzeit 15 s unter fließendem Wasser geeigneter Qualität spülen.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendungshinweise

Vor erstmaliger Anwendung von BIGUANID FLÄCHE NR ist eine Grundreinigung der Flächen mit einem geeigneten Produkt, zu empfehlen.

Zusammensetzung

100 g enthalten: 16 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid. Enthält Duftstoffe: Limonene.

Materialverträglichkeit

Die Anwendung wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Kupfer, Messing, Polyethylenterephthalat (PET), Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS).

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

FLÄCHE / DESINFEKTIONSMITTELKONZENTRATE

BIGUANID FLÄCHE NR



PREVENT

WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN

3 / 4



WIRKUNGSSPEKTRUM UND EINWIRKZEITEN			5 min	15 min	60 min
Anwendungsempfehlungen zur Flächendesinfektion (mit Mechanik)					
bakterizid, levurozid	EN 13727 EN 13624 EN 16615	niedrige und hohe Belastung	1 %		0,5 %
begrenzt viruzid	EN 14476	niedrige und hohe Belastung		1 %	

FLÄCHE / DESINFEKTIONSMITTELKONZENTRATE

BIGUANID FLÄCHE NR



PREVENT

GEBINDE

4 / 4

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Art. Nr.	PZN
BIGUANID FLÄCHE NR	Flasche	1 L	10	00-201-010-02	17529526
	Kanister	5 L	3	00-201-050-02	16858512
	Kanister	10 L	1	00-201-100-02	16858529

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Nationale Angaben können abweichen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Niederlassung oder den Händler vor Ort.



CE 0123

ZERTIFIZIERUNGEN



Unter folgendem Link finden Sie unsere Zertifikate und Siegel:

<https://www.schumacher-online.com/de/zert>

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.